



Abbott

Releasenotes bij de verplichte software-update van i-STAT 1 Release-opmerkingen bij software-update van april 2025

Deze update omvat informatie over nieuwe software voor de i-STAT 1-analyzer. **Dit is een verplichte i-STAT 1-software-update.** De software voor de i-STAT 1 Analyzer kan rechtstreeks van de Abbott-website worden gedownload: www.globalpointofcare.abbott.

HERINNERING:

- Klanten moeten een gebruikersaccount hebben op www.globalpointofcare.abbott om toegang te krijgen tot de softwarebestanden.

SOFTWAREVERSIE

De correcte versie van de software en CLEW om in uw analysators te installeren staat hieronder.

STANDAARDSOFTWARE
JAM2259 & CLEW A50

Let op: de actuele software verloopt op 18 juni 2025.

Vervaldatum

Vijftien dagen voordat de software verloopt wordt er een bericht weergegeven op het analysatorscherm om de gebruiker op de op handen zijnde vervaldatum te wijzen. Als deze update niet is uitgevoerd om 08:00 op 18 JUNI 2025, wordt het testen uitgeschakeld en vertoont de analysator de volgende tekstmelding: "SOFTWARE VERVALLEN – UPDATE VEREIST – ZIE HANDLEIDING" (kwaliteitscontrolecode 12).

De nieuwe software vervalt op 10 DEC 2025.

WAARDETOEWIJZINGSBLADEN (VAS EN eVAS)

Waardetoewijzingsbladen (VAS en eVAS) voor de nieuwe CLEW A50 kan worden gedownload of afgedrukt vanaf de Abbott-website: www.globalpointofcare.abbott.

STANDAARDISATIE

CLEW-update

Het i-STAT 1 System is ontworpen om operatorinvloed op geleverde resultaten uit te sluiten. De micro-gefabriceerde sensortechnologie produceert herhaalbare resultaten van serie tot serie, waarmee de analysators dezelfde set gestandaardiseerde waarden voor langere periodes gebruikt.

Desalniettemin is het door de voortdurende verbeteringen in het productieproces van Abbott nodig om de standaardisatiewaarden van tijd tot tijd opnieuw vast te stellen om de consistentie op de lange termijn te behouden. Dit is equivalent aan het afstellen van kalibratie op een traditionele analysator. Het is onze gewoonte om dit te doen met periodieke software-releases. Deze nieuwe CLEW herstelt de standaardisatie en bevat verfijningen van het interne kwaliteitscontrolesysteem.

Toekomstige zendingen van cartridges vereisen mogelijk de installatie van deze software voordat de cartridges kunnen worden gebruikt.

Deze software ondersteunt alle actuele, niet-verlopen cartridges.

DE SOFTWARE-UPDATE UITVOEREN

Voordat u met de software-update begint, moet u uw systeeminstellingen vaststellen aan de hand van onderstaande tabel. Zorg dat u administratieve rechten hebt op de computer die voor deze software-update wordt gebruikt.

Als u niet zeker bent over de methode die u moet gebruiken om de software-update uit te voeren of niet zeker weet of u beheerdersrechten hebt, kunt u contact opnemen met uw point-of-care programmabeheerder voor hulp.

Als u beschikt over een computer met:	Als u beschikt over een i-STAT/DE met:
• een verbonden serie <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) of <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) met een DB9 naar DB9-kabel met een USB-seriële adapter* OF • een <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-combinatie</i> (DRC-300) met USB-kabel** EN	• een netwerk <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) of <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) OF • een <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-combinatie</i> (DRC-300) EN
• een gedownload softwarebestand (CLEW/JAMS) van de website www.globalpointofcare.abbott.	• toegang tot Customization Workspace. EN • een gedownload softwarebestand (CLEW/JAMS) van de website www.globalpointofcare.abbott.
DAN	DAN
volgt u deze instructies op www.globalpointofcare.abbott: • <i>Instructies voor het updaten van i-STAT 1 Analyzer-software met www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i>	volg deze instructies die staan op www.globalpointofcare.abbott: • <i>Netwerkopties voor het updaten van de i-STAT 1 Analyzer met www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i>

* Volg de installatie-instructies van de fabrikant van de USB-seriële adapter. Abbott levert geen USB-seriële adapters voor gebruik met de DB9 naar DB9 (9-pins verbinding) kabel.

**Voor de i-STAT 1 Downloader/Recharger-combinatie (DRC 300) zal het Windows-besturingssysteem het juiste stuurprogramma vaststellen en toepassen. Zie *Sectie 6* van de *i-STAT 1 System Manual* voor meer informatie.

PRODUCTLEVENSCYCLUSHERINNERINGEN EN -MELDINGEN

Abbott streeft ernaar de hoogste normen te handhaven voor de producten die we ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden. Als onderdeel van deze toewijding is het noodzakelijk om producten door hun productlevenscyclus heen te leiden.

END-OF-SUPPORT HERINNERINGEN

Opmerking m.b.t. Microsoft Windows® 10

Veel producten van Abbott en partners zijn compatibel met en draaien op verschillende besturingssystemen en browsers. Van tijd tot tijd bereiken deze systemen het einde van hun levensduur en worden ze buiten gebruik gesteld.

Microsoft heeft aangekondigd dat het Windows® 10-besturingssysteem niet zal ondersteunen vanaf 14 oktober 2025. Bezoek de Microsoft-pagina voor end-of-support informatie voor kalenderjaar 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott adviseert klanten over te gaan naar een ondersteund besturingssysteem voor uw Abbott i-STAT-softwarecomponent(en). Afhankelijk van uw Abbott i-STAT-product(en) zijn er andere keuzes beschikbaar voor besturingssystemen.

Ondersteunde Abbott i-STAT-producten die draaien op Windows 10 zijn onder andere:

- i-STAT/DE-versies: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11, and v2.12
- Info HQ-versies: Info HQ v3.1
- Wireless Configuration Software: AlinIQ NCi v2.1.0.1 & WCU v2.0
- JammLite v4.3

Controleer gebruikersdocumentatie die specifiek is voor uw softwaresysteem op onze website <https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Voor hulp bij de overgang van een van de onderstaande componenten kunt u contact opnemen met uw lokale i-STAT-vertegenwoordiger

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.