



Notes pour la mise à jour logicielle obligatoire de l'i-STAT 1 System octobre 2025

Cette mise à jour comprend des informations sur le nouveau logiciel de l'i-STAT 1 Analyzer. **Il s'agit d'une mise à jour obligatoire du logiciel i-STAT 1.** Vous pouvez télécharger le logiciel de l'i-STAT 1 Analyzer directement depuis le site Internet d'Abbott : www.globalpointofcare.abbott.

RAPPEL :

- Les clients doivent avoir un compte utilisateur sur www.globalpointofcare.abbott pour accéder aux fichiers du logiciel.

VERSION DE LOGICIEL

La version correcte du logiciel et du CLEW à installer sur vos analyseurs est indiquée ci-dessous.

LOGICIEL STANDARD
JAM2260 & CLEW A51

Veillez noter que le logiciel actuel arrivera à expiration le 10-DÉCEMBRE-2025.

Date d'expiration Un message s'affichera sur l'écran de l'analyseur quinze jours avant l'expiration du logiciel pour avertir l'utilisateur de l'approche de la date d'expiration. Si aucune mise à jour n'est effectuée d'ici 8h00 le 10-DÉCEMBRE-2025, le test sera désactivé et l'analyseur affichera le message « EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL » (LOGICIEL EXPIRÉ – MISE À JOUR REQUISE – VOIR LE MANUEL) (code de vérification qualité 12).

Le nouveau logiciel expirera le 17-JUIN-2026.

MISES À JOUR ET AMÉLIORATIONS LOGICIELLES - OCTOBRE 2025

- Identifiant opérateur manquant pour les résultats du simulateur interne i-STAT
 - Correction d'un problème où l'identifiant opérateur était parfois manquant dans l'enregistrement des résultats du simulateur interne sur l'i-STAT1 analyzer. Ce problème persistait même si l'identifiant avait été saisi avant le test.
- AlinIQ NCi, l'utilitaire de configuration réseau pour i-STAT et i-STAT Alinity, est désormais compatible avec Windows 11. La version actuelle est la v2.1.0.1 et est disponible en téléchargement sur le site web d'Abbott www.globalpointofcare.abbott.

FICHES D'ATTRIBUTION DES VALEURS (FAV et eFAV)

Les fiches d'attribution des valeurs (FAV et eFAV) pour le nouveau CLEW A51 peuvent être téléchargées ou imprimées depuis le site Internet d'Abbott : www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDISATION

Mise à jour CLEW

L'i-STAT 1 System est conçu de façon à éliminer l'influence de l'opérateur sur les résultats générés. La technologie des capteurs miniaturisés produit des résultats homogènes d'un lot à l'autre, permettant ainsi aux analyseurs d'utiliser le même ensemble de valeurs de standardisation pendant de longues périodes.

Toutefois, les améliorations continues du processus de fabrication apportées par Abbott nécessitent de rétablir occasionnellement les valeurs de standardisation afin de maintenir une cohérence à long terme. Cela équivaut à l'ajustement du calibrage sur un analyseur traditionnel. Nous fournissons donc des mises à jour logicielles régulières qui permettent d'ajuster ces valeurs. Ce nouveau CLEW rétablit les valeurs de standardisation et intègre des perfectionnements au système de surveillance de qualité interne.

Les prochains envois de cartouches peuvent nécessiter l'installation de ce logiciel avant l'utilisation des cartouches.

Ce logiciel continue à prendre en charge toutes les cartouches actuelles non périmées.

EXÉCUTION DE LA MISE À JOUR DU LOGICIEL

Avant d'effectuer la mise à jour du logiciel, veuillez identifier la configuration de votre système selon le tableau ci-dessous. Assurez-vous que vous disposez des droits d'administrateur sur l'ordinateur utilisé pour la mise à jour du logiciel.

Si vous n'êtes pas sûr de la méthode à utiliser pour effectuer la mise à jour du logiciel ou si vous n'êtes pas sûr de disposer des droits d'administrateur, veuillez contacter l'administrateur de votre programme point-of-care pour obtenir des conseils.

SI vous avez un ordinateur avec :	SI vous avez un i-STAT/DE avec :
- un téléchargeur série <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ou <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) connecté à l'aide d'un câble DB9 à DB9 avec un adaptateur USB-série*. OU - une combinaison <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) avec câble USB** ET	- un réseau <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ou <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) OU - une combinaison <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) ET
un fichier logiciel téléchargé (CLEW/JAMS) à partir du site Web www.globalpointofcare.abbott.	- l'accès à Customization Workspace (Espace Personnalisation). ET - un fichier logiciel téléchargé (CLEW/JAMS) à partir du site Web www.globalpointofcare.abbott.
ALORS	ALORS
suivez les instructions situées sur www.globalpointofcare.abbott : <i>Instructions de mise à jour logicielle de l'i-STAT 1 Analyzer, à partir de www.globalpointofcare.abbott, Art. : 731335</i>	suivez les instructions situées sur www.globalpointofcare.abbott : <i>Options réseau pour la mise à jour de l'i-STAT 1 Analyzer, à partir de www.globalpointofcare.abbott, Art. : 731336</i>

* Suivez les instructions du fabricant de l'adaptateur USB-série pour l'installation. Abbott ne fournit pas d'adaptateurs USB-série à utiliser avec le câble DB9 à DB9 (connecteur à 9 broches).

**Pour la combinaison i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRC-300), le système d'exploitation Windows détectera et appliquera le pilote approprié. Pour obtenir davantage de détails, reportez-vous à la *Section 6* du *manuel de l'i-STAT 1 System*.

RAPPELS ET NOTIFICATIONS CONCERNANT LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS

Abbott s'engage à maintenir les normes les plus élevées pour les produits qu'il conçoit, développe et entretient. Dans le cadre de cet engagement, il est nécessaire d'assurer la transition des produits tout au long de leur cycle de vie.

RAPPEL(S) DE FIN DE PRISE EN CHARGE

Avis Microsoft Windows® 10

De nombreux produits d'Abbott et de ses partenaires sont compatibles avec divers systèmes d'exploitation et navigateurs et s'exécutent sur ceux-ci. De temps à autre, ces systèmes arrivent à la fin de leur vie utile et sont retirés.

Microsoft a annoncé qu'il ne prendra plus en charge le système d'exploitation Windows® 10 avec une date de fin de vie au 14 octobre 2025. Veuillez consulter la page Microsoft pour obtenir des informations sur la fin de la prise en charge pour l'année civile 2025 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott recommande aux clients de passer à un système d'exploitation pris en charge pour leurs composants logiciels Abbott i-STAT. En fonction de votre ou vos produits Abbott i-STAT, d'autres choix sont disponibles pour le système d'exploitation.

Connectivité de l'i-STAT & logiciel de configuration	Versions prises en charge	Prise en charge de Windows 10	Prise en charge de Windows 11
i-STAT/DE	v2.8 à v2.12	Oui	v2.12 uniquement
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 et v3.1	Oui	v3.1 uniquement
Logiciel de configuration sans fil : AlinIQ NCI	v2.1.0.1	Oui	Oui
Logiciel de configuration sans fil : WCU	v2.0	Oui	Oui
JammLite	v4.3	Oui	Oui

Veuillez consulter la documentation utilisateur spécifique à votre système logiciel sur notre site Web <https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Pour obtenir de l'aide lors de la transition de l'un des composants répertoriés, contactez votre représentant i-STAT local.

Mises à jour de la notice technique :

- Le bulletin technique « Configuration des paramètres sans fil dans un analyseur sans fil i-STAT 1 » a été mis à jour pour inclure des informations sur la compatibilité de l'utilitaire de configuration Windows (WCU) avec Windows 11.
- Le « guide d'utilisation i-STAT/DE v2.12 » a été mis à jour pour inclure des informations sur la compatibilité de l'i-STAT/DE avec Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.