



Abbott

Az i-STAT 1 System kötelező szoftverfrissítésének kiadással kapcsolatos megjegyzései 2026. április

Ez a frissítés az i-STAT 1 Analyzer új szoftverével kapcsolatos információkat tartalmazza. **Ez az i-STAT 1 egy kötelező szoftverfrissítése.** Az i-STAT 1 Analyzer szoftvere közvetlenül az Abbott weboldaláról tölthető le: www.globalpointofcare.abbott.

EMLÉKEZTETŐ:

- Minden felhasználónak felhasználói fiókkal kell rendelkeznie a www.globalpointofcare.abbott weboldalon a szoftverfájlok eléréséhez.

SZOFTVERVERZIÓ

A szoftver és a CLEW analizátorokra telepítéshez megfelelő verziója az alábbiakban található.

SZABVÁNYOS SZOFTVER

JAM2261 & CLEW A52

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelenlegi szoftver érvényessége 2026. június 17-én lejár.

Lejárat dátuma

Tizenöt nappal a szoftver lejártá előtt megjelenik egy üzenet az analizátor képernyőjén, amely figyelmezteti a felhasználót a közelgő lejáratú időpontra. Ha a frissítést 2026. június 17-én reggel 8 óráig nem hajtják végre, a tesztelés letiltásra kerül, és az analizátor a következő üzenetet jeleníti meg: „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL” (LEJÁRT SZOFTVER – FRISSÍTÉS SZÜKSÉGES – LÁSD A KÉZIKÖNYVET) (minőségellenőrzési kód: 12).

Az új szoftver 2026. december 9-én jár le.

ÉRTÉK-HOZZÁRENDELŐ LAPOK (VAS és eVAS)

Az új CLEW A52 érték-hozzárendelő lapjai (VAS és eVAS) letölthetők vagy kinyomtathatók az Abbott weboldaláról: www.globalpointofcare.abbott.

SZABVÁNYOSÍTÁS

CLEW-frissítés

Az i-STAT 1 System (rendszer) arra szolgál, hogy a kezelő ne befolyásolhassa a kapott eredményeket. A mikroérzékelő-technológia minden tételnél olyan megismételhető eredményeket produkál, amelyek lehetővé teszik az analízatoroknak, hogy ugyanazokat a szabványosítási értékeket használják hosszabb ideig.

Az Abbott által végzett folyamatos gyártási fejlesztések ugyanakkor időről időre szükségessé teszik a szabványosítási értékek korrigálását a hosszú távú konzisztencia fenntartása érdekében. Ez egyenértékű a kalibrálás hagyományos analízatoron történő beállításával. Mindezt pedig rendszeres szoftverfrissítésekkel érjük el. Az új CLEW szoftver korrigálja a szabványosítást, és finomhangolja a belső minőség-ellenőrzési rendszert.

A jövőben kiszállításra kerülő kazetták használatához előfordulhat, hogy telepíteni kell ezt a szoftvert.

Ez a szoftver támogatja az összes jelenlegi, nem lejárt kazettát.

A SZOFTVERFRISSÍTÉS ELVÉGZÉSE

Kérjük, hogy a szoftverfrissítés elvégzése előtt azonosítsa a rendszerbeállítását az alábbi táblázat alapján. Gondoskodjon róla, hogy a szoftverfrissítésre használt számítógépen rendszergazdai jogosultsággal rendelkezzen.

Ha nem biztos benne, hogy milyen módszert használ a szoftverfrissítésre, vagy hogy rendelkezik-e rendszergazdai jogosultsággal, kérjük, iránymutatásért forduljon az ápolóhelyi programrendszergazdához.

HA az Ön számítógépe:	HA az Ön i-STAT/DE eszköze:
<ul style="list-style-type: none">USB-s soros adapteren keresztül DB9–DB9 kábelt használó soros <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) vagy <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) rendelkezik* <p style="text-align: center;">VAGY</p> <ul style="list-style-type: none">USB-kábelt használó <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinációval</i> (DRC-300) rendelkezik** <p style="text-align: center;">ÉS</p>	<ul style="list-style-type: none">hálózati <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) vagy <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) rendelkezik <p style="text-align: center;">VAGY</p> <ul style="list-style-type: none"><i>i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinációjával</i> (DRC-300) rendelkezik <p style="text-align: center;">ÉS</p>
<ul style="list-style-type: none">a weboldalról (www.globalpointofcare.abbott) letöltött szoftverfájllal (CLEW/JAMS) rendelkezik.	<ul style="list-style-type: none">hozzáféréssel rendelkezik a Customization (Testreszabás) munkaterülethez. <p style="text-align: center;">ÉS</p> <ul style="list-style-type: none">a weboldalról (www.globalpointofcare.abbott) letöltött szoftverfájllal (CLEW/JAMS) rendelkezik.
AKKOR	AKKOR
kövesse a www.globalpointofcare.abbott címen található következő utasításokat:	kövesse a www.globalpointofcare.abbott címen található következő utasításokat:
<ul style="list-style-type: none">Az <i>i-STAT 1 Analyzer</i> szoftverének frissítésére vonatkozó utasítások a www.globalpointofcare.abbott weboldal használatával, cikksz.:731335	<ul style="list-style-type: none">Az <i>i-STAT 1 Analyzer</i> frissítésére vonatkozó hálózati opciók a www.globalpointofcare.abbott weboldal használatával, cikksz.:731336

* Kövesse az USB soros adapter gyártójának telepítési utasításait. Az Abbott nem biztosít USB-s soros adaptereket a DB9–DB9 kábelhez (9 tűs csatlakozó).

** Az *i-STAT 1* letöltő/újrátöltő kombinációjához (DRC-300) a Windows operációs rendszer észlelni és telepíteni fogja a megfelelő illesztőprogramot. Részletesebben lásd az *i-STAT 1 System* rendszerkézikönyvének 6. szakaszát.

AZ i-STAT/DE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁNAK FRISSÍTÉSEI

- A felhasználói útmutató frissítésre került annak jelzése céljából, hogy az i-STAT 1 analyzer nem támogatja a kezelői tanúsítványok 2049. december 30-át meghaladó érvényességi idejét. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelő szolgáltatójával, hogy korlátozzák vagy módosítsák a 2049. december 30-át meghaladó dátumokat.

A TERMÉK ÉLETCIKLUSÁRA VONATKOZÓ EMLÉKEZTETŐK ÉS ÉRTESÍTÉSE

Az Abbott az általunk tervezett, kifejlesztett és karbantartott termékeket illetően elkötelezte magát a legmagasabb színvonal mellett. Ennek az elkötelezettségnek a keretében szükséges a termékek átállítása az életciklusuk során

TÁMOGATÁS VÉGÉRE VONATKOZÓ EMLÉKEZTETŐ(K)

Microsoft Windows Server®

Számos Abbott- és partnertermék kompatibilis a különböző operációs rendszerekkel és böngészőkkel, és el is fut rajtuk. Időről időre ezek a rendszerek hasznos élettartamuk végére érnek, és kivonásra kerülnek.

- A Microsoft Windows Server® 2022 „mainstream” támogatása 2026. október 13-án ér véget. A kiterjesztett támogatás 2031. október 14-ig továbbra is elérhető lesz.
- A Microsoft Windows Server® 2016 „kiterjesztett” támogatása 2027. január 12-én ér véget. A Windows Server 2016 esetében ez lesz a Microsoft által biztosított támogatás utolsó napja.

Kérjük, egyeztessen az informatikai csapatával és az adatkezelő szolgáltatójával, hogy az i-STAT-ot támogató rendszereik támogatásának lejárta előtt gondoskodjanak az átállásról egy támogatott operációs rendszerre.

Kérjük, olvassa el a szoftverrendszeréhez tartozó felhasználói dokumentációt a weboldalunkon

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Bármely felsorolt összetevő átállásával kapcsolatos segítségért forduljon a helyi i-STAT-képviselőjéhez.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.