



Obowiązkowa aktualizacja oprogramowania systemu i-STAT 1 — Uwagi do wersji Kwiecień 2025 r.

Niniejsza aktualizacja zawiera informacje dotyczące nowego oprogramowania analizatora i-STAT 1 Analizer. **Ta aktualizacja oprogramowania i-STAT 1 jest obowiązkowa.** Oprogramowanie urządzenia i-STAT 1 Analizer może być pobrane bezpośrednio ze strony Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

PRZYPOMNIENIE:

- Klienci muszą posiadać konto użytkownika na stronie www.globalpointofcare.abbott, aby uzyskać dostęp do plików oprogramowania.

WERSJA OPROGRAMOWANIA

Prawidłową wersję oprogramowania CLEW do instalacji na analizatorach wskazano poniżej.

OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE
JAM2259 & CLEW A50

Należy pamiętać, że ważność bieżącej wersji oprogramowania wygaśnie 18 CZERWCA 2025 r.

Data ważności

Na piętnaście dni przed wygaśnięciem ważności oprogramowania na ekranie analizatora wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający użytkownika o zbliżającym się terminie. Jeżeli aktualizacja nie zostanie przeprowadzona do godziny 8:00 dnia 18 CZERWCA 2025 r., badania zostaną uniemożliwione, a na analizatorze wyświetlony zostanie komunikat „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL” (Ważność oprogramowania wygaśa – wymagana aktualizacja – patrz Podręcznik) (kod kontroli jakości nr 12).

Ważność nowego oprogramowania wygaśnie w dniu 10 GRUDNIA 2025 r.

KARTY PRZYPISANIA WARTOŚCI (VAS i eVAS)

Karty przypisania wartości (Value Assignment Sheets, VAS oraz eVAS) dla nowego oprogramowania CLEW A50 można pobrać lub wydrukować ze strony firmy Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARYZACJA

Aktualizacja oprogramowania CLEW

System i-STAT 1 opracowano w celu wyeliminowania wpływu operatora na uzyskiwane wyniki. Wykorzystane w nim mikroczujniki dostarczają powtarzalne wyniki dla każdej partii. Dzięki temu analizatory mogą używać takich samych zestawów wartości standaryzacyjnych przez dłuższy czas.

Jednakże ciągłe doskonalenie procesu produkcji przez Abbott powoduje, że od czasu do czasu konieczne jest ponowne ustalanie wartości standaryzacji w celu zachowania długotrwałego niezmiennego działania. Odpowiada to regulacji wartości kalibracji w tradycyjnym analizatorze. Dokonujemy tego poprzez okresowe publikowanie oprogramowania. Nowe oprogramowanie CLEW ponownie ustala standaryzację i wprowadza udoskonalenia wewnętrznego systemu monitorowania jakości.

Przyszłe dostawy wkładów mogą przed użyciem wymagać instalacji niniejszego oprogramowania.

Niniejsze oprogramowanie obsługuje wszystkie obecne wkłady, które nie utraciły ważności.

PRZEPROWADZANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania należy zidentyfikować konfigurację systemu zgodnie z poniższą tabelą. Należy upewnić się, że osoba przeprowadzająca aktualizację ma prawa administratora na komputerze używanym do aktualizacji oprogramowania.

Jeśli nie wiadomo, którą metodę aktualizacji oprogramowania zastosować lub czy osoba przeprowadzająca aktualizację ma uprawnienia administracyjne, należy skontaktować się z administratorem programu Point-of-care w celu uzyskania wskazówek.

W przypadku komputera z:	W przypadku oprogramowania i-STAT/DE z:
- podłączonym modulem szeregowym <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) lub <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) za pomocą kabla DB9 do DB9 z adapterem USB-Serial* LUB - modulem łączonym <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) oraz kablem USB** I	- modulem sieciowym <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) lub <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) LUB - modulem łączonym <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) I
pobranym plikiem oprogramowania (CLEW/JAMS) ze strony www.globalpointofcare.abbott.	- dostępem do przestrzeni dostosowywania I - pobranym plikiem oprogramowania (CLEW/JAMS) ze strony www.globalpointofcare.abbott.
NALEŻY	NALEŻY
postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie www.globalpointofcare.abbott :	postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie www.globalpointofcare.abbott :
<i>Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia i-STAT 1 Analizer za pośrednictwem strony internetowej www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731335</i>	<i>Opcje sieciowe do aktualizacji urządzenia i-STAT 1 Analizer za pośrednictwem strony internetowej www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731336</i>

* Postępować zgodnie z instrukcjami producenta przejściówki USB dotyczącymi instalacji. Firma Abbott nie dostarcza przejściówek USB do kabla DB9 na DB9 (złącze 9-pinowe).

**W przypadku połączonego modułu i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRC-300) system operacyjny Windows wykryje i zastosuje odpowiedni sterownik. Dodatkowe szczegóły zawiera Część 6 podręcznika systemu i-STAT 1.

PRZYPOMNIENIA I POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Firma Abbott zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów dla produktów, które projektujemy, opracowujemy i serwisujemy. W ramach tego zobowiązania konieczne jest, aby produkty przechodziły przez swój cykl życia.

POWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU WSPARCIA

Powiadomienie dotyczące systemu operacyjnego Microsoft Windows® 10

Wiele produktów Abbott i firm partnerskich jest zgodnych z różnymi systemami operacyjnymi oraz przeglądarkami, które są wykorzystywane do pracy tych produktów. Od czasu do czasu systemy te osiągają koniec ich eksploatacji i są wycofywane.

Firma Microsoft ogłosiła, że przestanie wspierać system operacyjny Windows® 10 i wyznaczyła datę końca jego eksploatacji na 14 października 2025 r. W celu uzyskania informacji na temat końca wsparcia dla roku kalendarzowego 2025 prosimy odwiedzić stronę firmy Microsoft:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott zaleca klientom, w odniesieniu do komponentów oprogramowania Abbott i-STAT, przejście na obsługiwany system operacyjny. W zależności od posiadanych produktów Abbott i-STAT istnieją alternatywne systemy operacyjne, które można wybrać dla tych produktów.

Do obsługiwanych produktów Abbott i-STAT, które działają na systemie Windows 10, należą:

- i-STAT/DE w wersjach: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11 i v2.12
- Info HQ w wersjach: Info HQ v3.1
- Oprogramowanie do konfiguracji bezprzewodowej: AlinIQ NCi v2.1.0.1 oraz WCU v2.0
- JammLite v4.3

Prosimy zapoznać się z dokumentacją użytkownika właściwą dla posiadanej wersji w naszej witrynie <https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

W celu uzyskania wsparcia z przejściem dla dowolnych komponentów z listy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem produktów i-STAT.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.