



Notas da versão de atualização obrigatória do software do Sistema i-STAT 1 Outubro de 2023

Esta atualização inclui informações sobre o novo software para o analisador i-STAT 1. **Esta é uma atualização obrigatória do software i-STAT 1.** O software do analisador i-STAT 1 deve ser descarregado diretamente do sítio da Abbott Point of Care: www.globalpointofcare.abbott.

LEMBRETE:

- Os clientes deverão ter uma conta de utilizador em www.globalpointofcare.abbott para aceder aos ficheiros do software.

ATUALIZAÇÕES:

Nota 1: Como comunicado anteriormente em maio de 2023, o software do analisador i-STAT 1 já não será fornecido por CD-ROM e estará disponível apenas na secção de Assistência do sítio da Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

Nota 2: O ecrã “Identificar cartucho” do analisador i-STAT 1 foi realçado para exibir os pontos agitados para indicar a atividade do analisador e uma mensagem adicional “NÃO REMOVER CARTUCHO” no fundo do visor do analisador.

Nota 3: O analisador i-STAT 1 detetará quando e apresentará um erro de identificação de cartucho se um simulador foi inserido após a digitalização de um código de barras de cartucho i-STAT.

VERSÃO DO SOFTWARE

A versão correta do software e CLEW a instalar nos seus analisadores está indicada abaixo.

SOFTWARE PADRÃO
JAM2156 & CLEW A47

Note que o software atual expira em 13 de DEZEMBRO de 2023.

Data de expiração Quinze dias antes de o software expirar, será exibida uma mensagem no ecrã do analisador para alertar o utilizador sobre a data de expiração iminente. Se esta atualização não for executada até às 8h de 13 de DEZEMBRO de 2023, o teste será desabilitado e o analisador irá indicar “SOFTWARE EXPIRADO - ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA – VER MANUAL” (EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL) (código de verificação de qualidade 12).

O novo software expira em 19 de JUNHO de 2024.

Abbott Point of Care Inc. • 100 & 200 Abbott Park Road • Abbott Park, IL 60064 • USA

FICHAS DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR (VAS e eVAS)

As Fichas de Atribuição de Valor (VAS e eVAS) relativas ao novo CLEW A47 podem ser descarregadas ou impressas no sítio da Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

PADRONIZAÇÃO

Atualização CLEW O Sistema i-STAT 1 foi concebido para eliminar a influência do operador sobre os resultados alcançados. A tecnologia de sensor microfabricado produz resultados reproduzíveis de lote para lote que permitem aos analisadores usarem o mesmo conjunto de valores padronizados por longos períodos de tempo.

No entanto, foram feitas melhorias de fabricação contínua pela Abbott que exigem reestabelecer os valores de padronização de vez em quando para manter a coerência a longo prazo. Isto é equivalente a ajustar a calibração de um analisador tradicional. Tem sido a nossa prática para realizar este ponto com lançamentos periódicos de software. Este novo CLEW restabelece a padronização e introduz melhorias ao sistema interno de monitorização da qualidade.

Futuros envios de cartuchos podem exigir a instalação deste software antes da utilização dos mesmos.

Este software é compatível com todos os atuais cartuchos não expirados.

EXECUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

Antes de executar a atualização do software, identifique a sua definição de sistema na tabela em baixo. Certifique-se que tem direitos administrativos no computador utilizado para a atualização do software.

Se tiver dúvidas quanto ao método a usar para executar a atualização do software ou se tem direitos administrativos, contacte o seu administrador de programa de assistência (point-of-care) para guiá-lo.

Caso tenha um computador com:	Caso tenha o i-STAT/DE com:
<ul style="list-style-type: none">um <i>Descarregador i-STAT 1</i> opcional (DS-300) ou um <i>Descarregador/Carregador i-STAT 1</i> (DRS-300) que use um cabo DB9 para DB9 com um adaptador opcional USB* <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none">uma <i>Combinação de Descarregador/Carregador i-STAT 1</i> (DRC-300) com cabo USB**	<ul style="list-style-type: none">um <i>Descarregador i-STAT 1</i> de rede (DN-300) ou um <i>Descarregador/Carregador i-STAT 1</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none">uma <i>Combinação de Descarregador/Carregador i-STAT 1</i> (DRC-300)
<ul style="list-style-type: none">um ficheiro de software descarregado (CLEW/JAMS) do sítio www.globalpointofcare.abbott.	<ul style="list-style-type: none">aceda ao espaço de trabalho de personalização.um ficheiro de software descarregado (CLEW/JAMS) do sítio www.globalpointofcare.abbott.
DEPOIS	DEPOIS
<p> siga estas instruções em www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Instruções para a atualização do software analisador i-STAT 1 com a utilização de www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731335</i>	<p> siga estas instruções em www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Opções de rede para a atualização do analisador i-STAT 1 com a utilização de www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731336</i>


* Siga as instruções de instalação do fabricante do adaptador opcional USB. A Abbott não fornece adaptadores opcionais USB para uso com cabos DB9 para DB9 (conector de 9 pinos).

**Para a combinação de Descarregador/Carregador i-STAT 1 (DRC-300), o sistema operativo de Windows detetará e colocará o driver adequado. Veja a *Secção 6 do Manual do Sistema i-STAT 1* para obter mais detalhes.

NOTIFICAÇÕES E LEMBRETES DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO

A Abbott está empenhada em manter os mais altos padrões dos produtos que projetamos, desenvolvemos e mantemos. Como parte deste compromisso, é necessário efetuar a transição dos produtos ao longo do seu ciclo de vida.

Ciclo de vida do produto

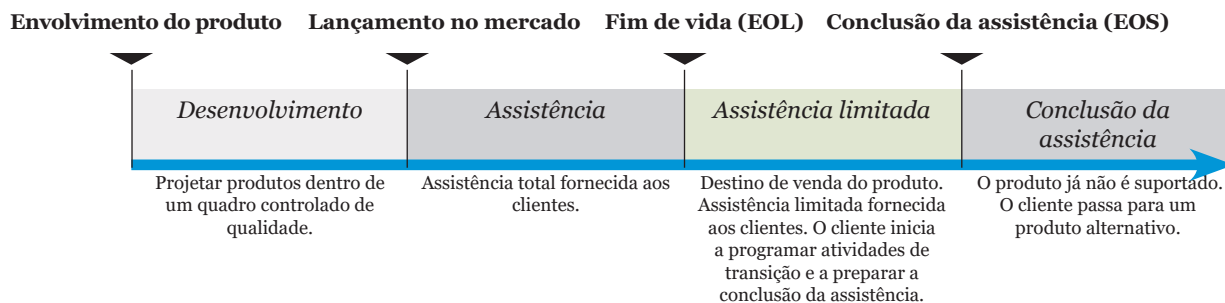

LEMBRETE(S) SOBRE A CONCLUSÃO DA ASSISTÊNCIA

Os produtos a seguir atingiram o fim da assistência. Contacte o seu representante local da Abbott caso tenha quaisquer perguntas ou para passar para um produto alternativo.

- Os cartuchos i-STAT E3+ e EC4+ alcançaram o fim do ciclo de vida em maio de 2022. A conclusão da assistência é em maio de 2023 com o lançamento do software do analisador i-STAT 1. As informações do produto serão eliminadas dos documentos de utilizador do sistema i-STAT 1 até novembro de 2024.

© 2023 Abbott. Todos os direitos reservados. Todas as marcas mencionadas são marcas comerciais de empresas do Abbott Group ou dos seus respetivos proprietários.