



Notas da versão de atualização obrigatória do software do i-STAT 1 System Abril de 2024

Esta atualização inclui informações sobre o novo software para o i-STAT 1 Analyzer. **Esta é uma atualização obrigatória do software do i-STAT 1.** O software do i-STAT 1 Analyzer deve ser descarregado diretamente do sítio da Abbott Point of Care: www.globalpointofcare.abbott.

LEMBRETE:

- Os clientes deverão ter uma conta de utilizador em www.globalpointofcare.abbott para aceder aos ficheiros do software.

ATUALIZAÇÕES:

Nota 1: Como comunicado anteriormente em outubro de 2023, o software do i-STAT 1 Analyzer já não será fornecido por CD-ROM e estará disponível apenas na secção de Assistência do sítio da Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

VERSÃO DO SOFTWARE

A versão correta do software e do CLEW a instalar nos seus analisadores é indicada abaixo.

SOFTWARE PADRÃO
JAM2157 & CLEW A48

Note que o software atual expira em 19 de JUNHO de 2024.

Data de expiração Quinze dias antes de o software expirar, será exibida uma mensagem no ecrã do analisador para alertar o utilizador sobre a data de expiração iminente. Se esta atualização não for executada até às 8h de 19 de JUNHO de 2024, o teste será desabilitado e o analisador irá indicar «SOFTWARE EXPIRADO - ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA – VER MANUAL» (EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL) (código de verificação de qualidade 12).

O novo software expira em 11 de DEZEMBRO de 2024.

FICHAS DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR (VAS e eVAS)

As Fichas de Atribuição de Valor (VAS e eVAS) relativas ao novo CLEW A48 podem ser descarregadas ou impressas no sítio da Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

PADRONIZAÇÃO

Atualização CLEW

O i-STAT 1 System foi concebido para eliminar a influência do operador sobre os resultados alcançados. A tecnologia de sensor microfabricado produz resultados reproduzíveis de lote para lote que permitem aos analisadores usarem o mesmo conjunto de valores padronizados por longos períodos de tempo.

No entanto, foram feitas melhorias de fabricação contínua pela Abbott que exigem reestabelecer os valores de padronização de vez em quando para manter a coerência a longo prazo. Isto é equivalente a ajustar a calibração de um analisador tradicional. Tem sido a nossa prática para realizar este ponto com lançamentos periódicos de software. Este novo CLEW restabelece a padronização e introduz melhorias no sistema interno de monitorização da qualidade.

Futuros envios de cartuchos podem exigir a instalação deste software antes da utilização dos mesmos.

Este software é compatível com os atuais cartuchos não expirados.

EXECUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

Antes de executar a atualização do software, identifique a sua definição de sistema na tabela em baixo. Certifique-se que tem direitos administrativos no computador utilizado para a atualização do software.

Se tiver dúvidas quanto ao método a usar para executar a atualização do software ou se tem direitos administrativos, contacte o seu administrador de programa de assistência (point-of-care) para guiá-lo.


Caso tenha um computador com:	Caso tenha o i-STAT/DE com:
<ul style="list-style-type: none">um <i>i-STAT 1 Downloader</i> opcional (DS-300) ou um <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) que use um cabo DB9 para DB9 com um adaptador opcional USB* <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none">uma <i>Combinação de i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) com cabo USB** <p style="text-align: center;">E</p>	<ul style="list-style-type: none">um <i>i-STAT 1 Downloader</i> de rede (DN-300) ou um <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none">uma <i>Combinação de i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) <p style="text-align: center;">E</p>
<ul style="list-style-type: none">um ficheiro de software (CLEW/JAMS) descarregado do sítio www.globalpointofcare.abbott.	<ul style="list-style-type: none">acesso ao espaço de trabalho de personalização. <p style="text-align: center;">E</p> <ul style="list-style-type: none">um ficheiro de software (CLEW/JAMS) descarregado do sítio www.globalpointofcare.abbott.
DEPOIS	DEPOIS
<p> siga estas instruções em www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Instruções para a atualização do software do i-STAT 1 Analyzer com a utilização de www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731335</i>	<p> siga estas instruções em www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Opções de rede para a atualização do i-STAT 1 Analyzer com a utilização de www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731336</i>

* Siga as instruções de instalação do fabricante do adaptador opcional USB. A Abbott não fornece adaptadores opcionais USB para uso com cabos DB9 para DB9 (conector de 9 pinos).

**Para a Combinação de i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRC-300), o sistema operativo Windows detetará e aplicará o controlador adequado. Consulte a *Secção 6 do Manual do i-STAT 1 System* para obter mais detalhes.

NOTIFICAÇÕES E LEMBRETES DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO

A Abbott está empenhada em manter os mais altos padrões dos produtos que projetamos, desenvolvemos e mantemos. Como parte deste compromisso, é necessário efetuar a transição dos produtos ao longo do seu ciclo de vida.

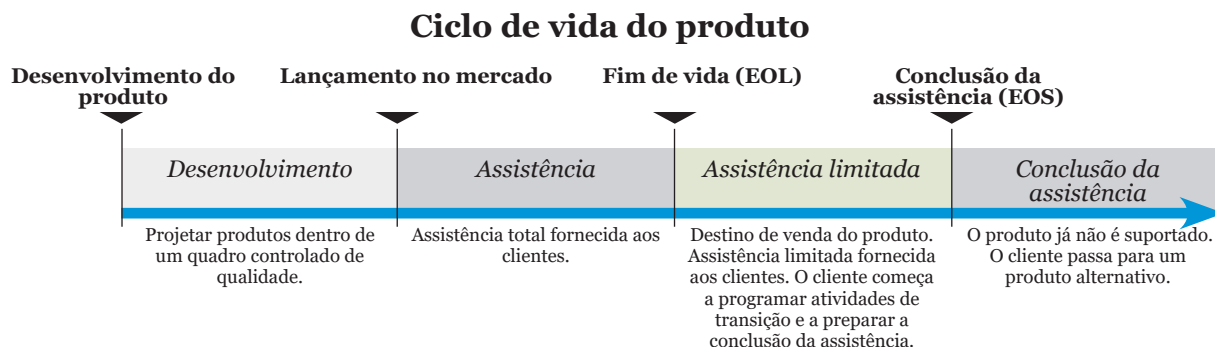

LEMBRETE(S) SOBRE A CONCLUSÃO DA ASSISTÊNCIA

Nenhum produto chegou ao fim da vida útil ou ao fim do suporte durante este ciclo.

ATUALIZAÇÕES AO MANUAL DO i-STAT 1 SYSTEM

A folha de rosto do Manual do i-STAT 1 System foi atualizada com as seguintes alterações:

- As informações relativas ao representante autorizado na União Europeia (EC-REP) foram removidas
- Foram adicionadas notas da versão que resumem as alterações introduzidas no Manual do i-STAT 1 System

O índice foi atualizado para refletir a numeração atual das páginas de cada secção.

A Secção 3 (i-STAT 1 Analyzer) e a Secção 15 (Personalização) foram atualizadas para incluir uma nova imagem que apresenta o conteúdo atualizado da Página de estado do analisador. Foi adicionado um novo parâmetro Versão à página de estado, o qual indica a versão atual do software de aplicação instalado no analisador.

- Foi igualmente adicionada uma nova secção de Regulamentos EMC diretamente após a tabela de Especificações para indicar que o i-STAT 1 Analyzer está em conformidade com os requisitos das normas IEC 61326-1 e IEC 61326-2-6

A secção 6 (i-STAT 1 Downloader/Recharger) foi atualizada para incluir as instruções de configuração do DRC-300 no Windows 11. Além disso, foi adicionada uma linha à tabela de indicadores LED do DRC-300 para esclarecer o comportamento das luzes LED quando uma bateria sobresselente é inserida no compartimento de recarga.

A secção 11 (Resolução de problemas do Analisador) foi atualizada para incluir o Código de verificação de qualidade 69.

A secção 12 (Controlo de qualidade) e a secção 13 (Verificação da calibração) foram atualizadas para mover o procedimento de teste dos materiais de controlo de qualidade ou de verificação da calibração para o início de cada secção.

ATUALIZAÇÕES DO BOLETIM TÉCNICO

O Boletim Técnico de Mensagens Codificadas do analisador foi atualizado para incluir o Código de verificação de qualidade 69.

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.