



i-STAT 1 System Zorunlu Yazılım Güncellemesi Sürüm Notları Nisan 2026

Bu güncelleme, i-STAT 1 analiz cihazına yönelik yeni yazılımla ilgili bilgileri içermektedir. **Bu, zorunlu bir i-STAT 1 Software güncellemesidir.** i-STAT 1 analiz cihazı yazılımını doğrudan Abbott internet sitesinden indirebilirsiniz: www.globalpointofcare.abbott.

HATIRLATMA:

- Müşterilerin yazılım dosyalarına erişebilmesi için www.globalpointofcare.abbott adresinde kullanıcı hesaplarının olması gerekmektedir.

YAZILIM SÜRÜMÜ

Analiz cihazlarınıza yüklemeniz gereken doğru yazılım ve CLEW sürümü aşağıda sıralanmaktadır.

STANDART YAZILIM
JAM2261 & CLEW A52

Mevcut yazılımın geçerlilik süresinin 17 HAZİRAN 2026 tarihinde sonlanacağını lütfen unutmayınız.

Son Geçerlilik Tarihi Yazılımın geçerlilik süresinin sonlanacağı tarihten on beş gün önce, analiz cihazının ekranında kullanıcıyı son geçerlilik tarihinin yaklaştığı konusunda uyarıcı bir mesaj görüntülenecektir. Eğer bu güncelleme 17 HAZİRAN 2026 günü, saat sabah 08:00'e kadar yapılmazsa, testler devre dışı bırakılacak ve analiz cihazında "EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL (YAZILIM GEÇERLİLİĞİ SONA ERDİ – GÜNCELLEME GEREKLİ – ELKİTABINA BAKINIZ)" mesajı görüntülenecektir (Kalite Kontrol Kodu 12).

Yeni yazılımın son geçerlilik tarihi 09 Aralık 2026'dır.

VALUE ASSIGNMENT SHEETS (VAS ve eVAS (DEĞER ATAMA SAYFALARI))

Yeni CLEW A52 için Value Assignment Sheet'leri (VAS ve eVAS) Abbott internet sitesinden indirebilir veya yazdırabilirsiniz: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDİZASYON

CLEW Güncellemesi i-STAT 1 System, elde edilen sonuçlar üzerindeki operatör etkisini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmaktadır. Mikro ölçekte üretilen sensör teknolojisi lotlar arasında tekrarlanabilir sonuçlar sağlamaktadır; bu da analiz cihazlarının standardizasyon sağlayan aynı değerler setini uzun süreler boyunca kullanabilmesine olanak tanımaktadır.

Bununla birlikte, Abbott'un üretim sürecinde yaptığı sürekli iyileştirmeler, uzun vadeli tutarlılığı sağlayabilmek ve koruyabilmek için standardizasyon değerlerinin zaman zaman yeniden belirlenmesini gerektirmektedir. Bu, geleneksel bir analiz cihazında kalibrasyon ayarları yapmaya eşdeğerdir. Bizim uygulamamız, periyodik yazılım sürümleri yayınlayarak bunu yapmaktır. Bu yeni CLEW, standardizasyonu yeniden tesis eder ve iç kalite izleme sisteminin bünyesine iyileştirmeler getirir.

Gelecekte gönderilecek kartuşların kullanılabilmesi için bu kartuşlar kullanılmadan önce bu yazılımın yüklenmesi gerekmektedir.

Bu yazılım, geçerlilik süresi sonlanmamış olan tüm güncel kartuşları desteklemektedir.

YAZILIM GÜNCELLEMESİNİN YAPILMASI

Yazılım güncellemesini yapmadan önce, aşağıdaki tabloyu inceleyerek sistem kurulumunuzu belirleyiniz. Yazılım güncellemesi için kullandığınız bilgisayarda yönetici haklarına sahip olduğunuzdan emin olunuz.

Yazılım güncellemesini yapmak için kullandığınız yöntemden emin değilseniz ya da yönetici haklarına sahip olup olmadığınızı bilmiyorsanız, yardım almak için lütfen point-of-care program yöneticinizle iletişime geçiniz.

EĞER aşağıdaki özelliklere sahip bir Bilgisayarınız varsa:	EĞER aşağıdaki özelliklere sahip i-STAT/DE cihazınız varsa:
<ul style="list-style-type: none">USB-Serial adaptörü* ile DB9 ilâ DB9 kablo kullanılarak bağlanmış bir Serial <i>i-STAT 1 Downloader (DS-300)</i> ya da <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRS-300)</i> <p style="text-align: center;">YA DA</p> <ul style="list-style-type: none">USB Kablo** ile bir <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300)</i> <p style="text-align: center;">VE</p>	<ul style="list-style-type: none">bir Network <i>i-STAT 1 Downloader (DN-300)</i> ya da <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRN-300)</i> <p style="text-align: center;">YA DA</p> <ul style="list-style-type: none">bir <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300)</i> <p style="text-align: center;">VE</p>
<ul style="list-style-type: none">www.globalpointofcare.abbott internet sitesinden indirilen bir Software File (CLEW/JAMS (Yazılım Dosyası)).	<ul style="list-style-type: none">Customization Workspace erişimi. <p style="text-align: center;">VE</p> <ul style="list-style-type: none">www.globalpointofcare.abbott internet sitesinden indirilen bir Software File (CLEW/JAMS (Yazılım Dosyası)).
BU DURUMDA	BU DURUMDA
<p>www.globalpointofcare.abbott internet sitesindeki talimatları izleyiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Instructions for Updating i-STAT 1 Analyzer Software Using www.globalpointofcare.abbott (www.globalpointofcare.abbott Kullanılarak i-STAT 1 Analyzer Software Güncelleme Talimatları)</i>, Art:731335	<p>www.globalpointofcare.abbott internet sitesindeki talimatları izleyiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Network Options for Updating the i-STAT 1 Analyzer Using www.globalpointofcare.abbott (www.globalpointofcare.abbott Kullanılarak i-STAT 1 Analyzer Güncellemesi İçin Ağ Seçenekleri)</i>, Art:731336

* Kurulum için USB-Serial adaptörünün üretici talimatlarını izleyiniz. Abbott firması, DB9 ilâ DB9 (9 uçlu fiş) kabloyla kullanım için USB-Serial adaptör temin etmemektedir.

** i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300 (i-STAT 1 İndirme/Şart Etme Cihazı Kombinasyonu)) için, Windows işletim sistemi uygun sürücüyü algılayacak ve uygulayacaktır. Daha fazla detay için bakınız: *i-STAT 1 System Manual Section 6* (i-STAT 1 Sistem Elkitabı, Bölüm 6).

i-STAT/DE KULLANICI KILAVUZU GÜNCELLEMELERİ

- Kullanıcı kılavuzu, i-STAT 1 analiz cihazının 30 Aralık 2049 tarihinden sonraki Operatör sertifikası son geçerlilik tarihlerini desteklemediğini göstermek için güncellenmiştir. 30 Aralık 2049'dan sonraki tarihleri sınırlamak veya değiştirmek için Data Management (Veri Yönetimi) tedarikçinizle birlikte hareket ediniz.

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ HATIRLATICILARI VE BİLDİRİMLER

Abbott firması olarak tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve bakımını yaptığımız ürünler için en yüksek standartları korumayı taahhüt ederiz. Bu taahhüdümüzün bir parçası olarak ürünlerin kendi yaşam döngüleri boyunca geçişinin sağlanması gerekmektedir.

DESTEĞİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN HATIRLATICI(LAR)

Microsoft Windows Server®

Abbott ve iş ortaklarının birçok ürünü, çeşitli işletim sistemleri ve tarayıcılarla uyumludur ve bu sistemlerde çalışmaktadır. Zaman zaman bu sistemlerin kullanım ömrü sona ermektedir ve bu sistemler hizmetten çekilmektedir.

- Microsoft Windows Server® 2022 için 'Ana Akım' Destek sona erme tarihi 13 Ekim 2026'dır. 14 Ekim 2031 tarihine kadar Uzatılmış Destek hizmeti sunulmaya devam edecektir.
- Microsoft Windows Server® 2016 için 'Ana Akım' Destek sona erme tarihi 12 Ocak 2027'dir. Bu, Windows Server 2016 için son Microsoft desteği olacaktır.

i-STAT'ı destekleyen sistemlerinize yönelik destek sona ermeden önce desteklenen bir işletim sistemine geçişi ayarlamak için IT Ekibinizle ve Data Management tedarikçinizle birlikte hareket ediniz.

Lütfen yazılım sisteminize özgü kullanıcı dokümantasyonunu internet sitemizden kontrol ediniz

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Sıralanan bileşenlerden herhangi birinin geçişiyle ilgili yardım almak için yerel i-STAT temsilcinizle iletişime geçiniz.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.